アイアイサポーター2

12,100円(税込)

弱視の方の読書や筆記を協力サポート





○拡大読書器として



○筆記時にも

アイアイサポーターが皆様のご意見を取り入れまして新たな製品「アイアイサポーター 2 」 として、生まれ変わり発売することとなりました。

基本的な使用部分は変わっておりませんが、より便利な機能を追加いたしました。

本製品にiPhoneやiPad・iPad miniのカメラを角の穴に合わせて配置すると、A4サイズの書類全面を撮影できます。そのままOCRアプリを使ってテキスト読み上げさせることができます。

また、斜めに置くことで拡大読書器として利用したり、カメラを反転させて鏡のように使う こともできます。高さや角度の変更が容易にでき、字を書いたり、爪を切ったりするときに も便利です。iPhoneやiPadは磁石のストッパーで固定できるようになっています。

【注意】 iPad等モバイル機器は付属しません。

※製品改良のため、仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

商品に関する詳しい情報を知りたい方は、お気軽に弊社までお問合せください。

音声コードUni-Voiceに対応

【注意】ユニボイスアプリは付属しません。



市役所などから送られてくる郵便物に印字されている音声コードUni-Voice(ユニボイス)に対応しました。ユニボイスは無料のアプリを使うことで郵便物の内容を読み上げてくれる便利なコードです。

本製品の高さを調節し足の短い状態でiPadなどの機器を本製品にセットしてください。その状態でユニボイスアプリを起動してコード読み込むと音声にて郵便の内容をお知らせしてくれます。

上図:音声コードUni-Voice(ユニボイス)のサンプル例

右図:ユニボイスを読み込んでいる状態



新聞やチラシを読むときには



付属のキャスターを取り付けることで、新聞やチラシなどの上で本製品を容易に使えるようになり、手軽に新聞やチラシなどを読むことができるようになります。



·本	ad やiPhone など異なるサイズのモバイル機種を磁石付きのL字ス ・ッパーで簡単に本体へ固定できます。 体の足は3段階に調整できます。 3段:OCR機能を使ってA4資料を読み込むとき 1段:音声コードUni-Voice(ユニボイス)機能を使ってコードを読 み込むとき 体の足を斜めにすることで、拡大鏡として大きく見えて、まわりを なく使えます。筆記や爪を切ったりするときなど、凄く便利です。
・本	体の足は3段階に調整できます。 3段:OCR機能を使ってA4資料を読み込むとき 1段:音声コードUni-Voice(ユニボイス)機能を使ってコードを読み込むとき 体の足を斜めにすることで、拡大鏡として大きく見えて、まわりを
	3 段:OCR 機能を使ってA4 資料を読み込むとき 1 段:音声コードUni-Voice(ユニボイス) 機能を使ってコードを読 み込むとき 体の足を斜めにすることで、拡大鏡として大きく見えて、まわりを
_	1段:音声コードUni-Voice(ユニボイス)機能を使ってコードを読み込むとき 体の足を斜めにすることで、拡大鏡として大きく見えて、まわりを
_	み込むとき 体の足を斜めにすることで、拡大鏡として大きく見えて、まわりを
_	体の足を斜めにすることで、拡大鏡として大きく見えて、まわりを
+	
	く使えます。筆記や爪を切ったりするときなど、凄く便利です。
広	
· 付	属のキャスターを使えば、拡大表示しながらスムーズに移動できま
す	- 。新聞やチラシなどを読むとき、おすすめです。
·マ	ジックテープやマグネットを使っているので収納が簡単、iPad より
_	-回り大きいサイズで軽いので持ち運びが便利です。
対応機種 iPhone	: iPhone 6 以降、iPhone SE
iPad Pro	o:11.0 インチまで
iPad Air	r:iPad Air 2 以降
iPad : 第	5世代以降
iPad mi	ni:iPad mini 2 以降
iPod to	uch: 第6 世代以降
本体サイズ 280mm	1×200mm×30mm
重量 670g	
注意点 ※iPad	やiPHone 等のモバイル機器は付属しません。
※製品	改良のため、仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

iPadやiPhone等と組み合わせるだけで、読上げ機能・拡大鏡・卓上ミラー

___ お問合せ先 -

Blind Solution

合同会社ブラインド・ソリューション 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西六丁目20番13号 アドバンス西葛西703

TEL 080-8491-5512

製品概要

URL:https://blind-s.co.jp//Email:info2020@blind-s.co.jp

